
Microarenador LAB 100122



Manual del usuario

1. Introducción

El Microarenador Lab es un equipo neumático portátil de fácil instalación y operación, usado para aplicación en superficies, principalmente en laboratorios odontológicos.

El uso del Microarenador en los laboratorios de odontología viene siendo cada vez más solicitado debido a su funcionalidad, ergonomía y precisión en trabajos de pequeño porte y/o cuando el área que va a ser chorreada está cerca de áreas que deben ser preservadas del chorreado.

El Microarenador Lab tiene una aguja eyectora fabricada en carburo sinterizado lo que asegura una mayor durabilidad y precisión del chorreado.

Tiene 1 punta fija montada en ángulo de 138°.



¡Atención! Antes de operar el equipo, lea atentamente todas las instrucciones contenidas en este manual.

2. Especificaciones técnicas

Peso del Microarenador Lab s/ embalaje:65 g
Peso del Microarenador Lab c/ embalaje:265 g
Dimensiones del embalaje (LxWxH):195 x 110 x 45 mm
Presión de trabajo: 60 a 80 lbf/pul² (4~5,5 kgf/cm²)
Granulación de óxido de aluminio soportada: hasta 100 micrones

3. Contenido del embalaje

Al abrir el embalaje, compruebe en su interior la existencia de los siguientes elementos según el modelo especificado:

- 01 Microarenador con punta fija y aguja eyectora en 138°;
- 01 Enganche rápido;
- 01 Conexión al equipo;
- 01 Depósito con 40g de óxido de aluminio 50 micrones;
- 01 Manual de Instrucciones;
- 01 Adaptador para tubo de Ø 6 mm.


4. Características principales del modelo:

Punta fija (no intercambiable) con aguja eyectora en 138°
Punta no autoclavable
Utilización de óxido de aluminio con granulación de hasta 100 micrones
Sin posibilidad de utilización intraoral
Utilización exclusiva en laboratorios

5. Elementos principales del producto:

- 01- Aguja eyectora
- 02- Punta Fija 138°
- 03- Cuerpo del Microarenador
- 04- Botón de accionamiento
- 05- Tapa del depósito del abrasivo
- 06- Depósito del abrasivo

- 07- Enganche rápido para uso en compresor (Ø 8 mm)
- 08- Tuerca del enganche para fijar la manguera PU
- 09- Conexión para equipo
- 10- Tuerca con espiga
- 11- Adapador para tubo de Ø 6 mm

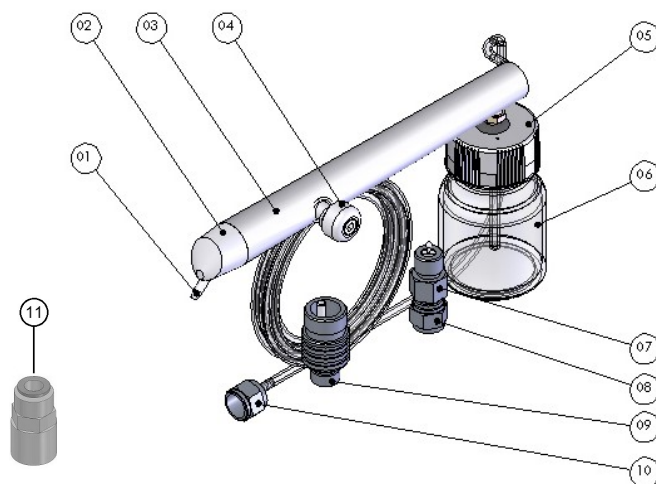

6. Instrucciones de instalación



El Microarenador LAB se tiene que instalar a través de la tuerca con espiga (10) en una red de aire comprimido puro y seco.

Para seguridad del equipo, usuario y mejor desempeño durante los trabajos de chorreado, asegúrese que la presión de la red de aire comprimido se mantenga estable en **60 a 80 lbf/pul² (4~5,5 kgf/cm²)**.


Junto con el producto se suministran las conexiones (07, 08 y 09) con el fin de facilitar su conexión durante la instalación, que puede estar conectado a una red estándar de aire comprimido o a la terminal de baja rotación del equipo, según lo descrito en las ilustraciones a continuación:

Conexión a compresor tubo Ø8:

Conexión a compresor tubo Ø6:

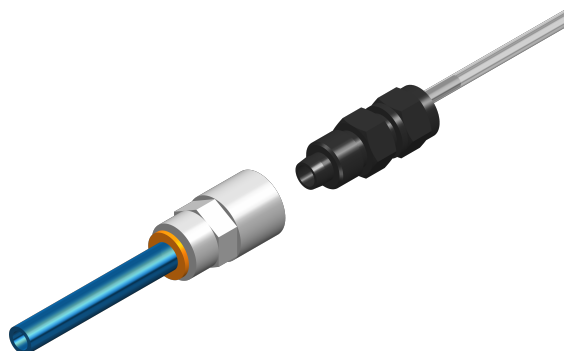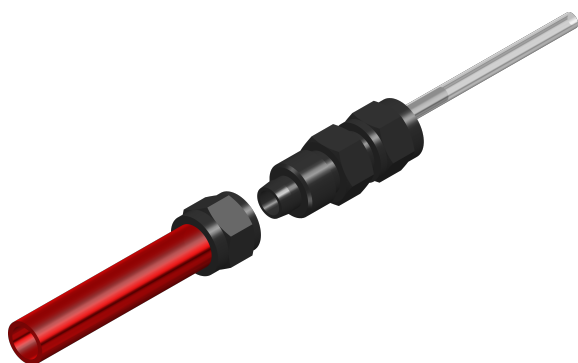

Conexión a equipo adaptador Midwest (hay que cortar el tubo):

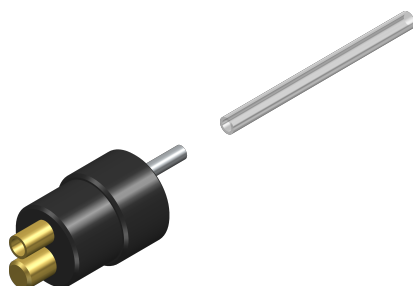

Una vez finalizada la instalación del Microarenador, siga correctamente las instrucciones de uso y las demás informaciones de precauciones y de seguridad descritas a continuación.

7. Instrucciones de uso

1- Retire la abrazadera del botón de accionamiento (04).



Al retirar la abrazadera del botón de accionamiento (04), trate de utilizarlo en ese momento y siempre después del uso del Microarenador, retorne la respectiva abrazadera al botón (04) manteniéndolo así siempre presionado. El acto de mantener libre la abrazadera del botón, durante largos períodos puede producir la adherencia de las paredes del tubo de accionamiento interno produciendo dificultad en el paso del óxido.

Nota: La punta (02) permite una rotación de hasta 180°, facilitando así la realización de los más diversos tipos de trabajo.

2- Abastezca el depósito (06) con, máximo $\frac{3}{4}$, de su capacidad con el óxido de aluminio y fijarlo en la tapa del depósito de abrasivo (5) ubicado en la extremidad del cuerpo del Microarenador.



Utilice sólo abrasivos del tipo óxido de aluminio y con granulaciones en el rango de hasta 100 micrones.

Nota: se comercializa para el consumo y reposición el óxido de aluminio ideal para la utilización con el Microarenador.

3- Con el depósito debidamente abastecido e insertado en el Microarenador, presione el botón de accionamiento (04) para iniciar el proceso de chorreado.

Observación:

Si por alguna razón el chorreado es interrumpido incluso estando el botón de accionamiento (04) presionado y el depósito (06) abastecido de abrasivo, siga los pasos a continuación:

- mantenga el botón de accionamiento (04) presionado;
- con la otra mano, sujetar firmemente la manguera cerca del extremo del cuerpo del Microarenador, tirando ligeramente de ella y luego soltándola;
- repita este procedimiento hasta que el paso del aire se encuentre desobstruido.

4- Trate de mantener siempre una distancia de 5 a 10 mm entre la cara de la punta de la aguja (01) del Microarenador y la superficie a ser trabajada durante el chorreado.

Notas importantes:

- Para obtener mejores resultados durante los trabajos de chorreado, hacer pequeños movimientos rápidos y constantes por toda la superficie a ser chorreada.
- A continuación, se presentan algunas recomendaciones de granulación de óxido de aluminio indicadas para algunos ejemplos de aplicación. A discreción del profesional elegir la granulación que más le convenga, siempre que sea soportado por el Microarenador (hasta 100 micrones).

APLICACIONES	GRANULACIÓN
Microrretenciones (aspereza de la superficie)	50 micrones
Reciclaje de brackets (limpieza)	90 micrones
Eliminación de cemento de coronas metálicas, resina, cerámica y demás materiales	90 micrones
Limpieza de piezas fundidas	90 micrones
Eliminación de oxidación	90 micrones



El Microarenador LAB es un equipo destinado exclusivamente a producir un chorro con la función de abrasión, no tiene función profiláctica, es decir, no tiene ninguna semejanza con los equipos para chorros de bicarbonato de sodio.

8. Mantenimiento y limpieza

- Antes de desconectar el Microarenador de la red de aire comprimido o del equipo, remueva el depósito de abrasivo (06) y luego coloque el dedo en la punta de la aguja eyectora (01) tapando el orificio de la aguja y simultáneamente presione el botón de accionamiento (04) por aproximadamente tres segundos para que la manguera interna agote por completo el abrasivo que todavía pueda estar en el sistema. Este proceso se denomina “Retrochorro”.



El procedimiento de “Retrochorro” no se debe ejecutar por un tiempo superior a cinco segundos, esto puede provocar que el depósito de abrasivos se rompa (06).

- Para limpiar el Microarenador, utilice sólo paño humedecido con agua o alcohol 70%.



El Microarenador nunca deberá recibir pulverización de líquidos, ni ser sumergido o esterilizado en estufa o autoclave.

- Mantenga la red de aire comprimido siempre libre de humedad y de aceite, siempre tomando en cuenta la eficiencia de los filtros coalescentes de su compresor.

9. Precauciones de seguridad

Uso Intraoral:



Debido a las características constructivas del Microarenador modelo Lab, su utilización se debe limitar a laboratorios, por lo tanto, no es indicado para procedimientos intraorales.



La responsabilidad de utilización del producto con relación a los elementos de seguridad, medio ambiente, protección individual del operador, indicaciones y contraindicaciones y efectos colaterales son de exclusiva responsabilidad del profesional responsable.

El fabricante se exime de responsabilidad por los daños causados como consecuencia del mal uso del Microarenador y en los casos en los que no se han respetados los elementos de seguridad que se describen en este documento.

Uso general y de laboratorio:

Es obligatorio el uso de equipos de protección individual (EPI's) cuando se utiliza el Microarenador Lab. Use gafas de protección, guantes y máscara respiratoria cuando opere el equipo.

Además de estos EPI's y para los casos en que el trabajo ofrece tales condiciones, recomendamos el uso de la cámara de succión.



Cámara de trabajo (Ref. 080216):

La cámara, (no incluida) es un producto complementario para uso en conjunto con el microarenador, fabricada por Mestra con el objetivo de no permitir que el excedente del óxido de aluminio y las impurezas producidas en el proceso de chorreado sean liberadas en el ambiente.

La cámara proporciona una amplia visibilidad y una mayor limpieza, rapidez, eficiencia, seguridad y funcionalidad en los procesos de chorreado.

10. Advertencias

- Nunca direccione la aguja eyectora (01) a cualquier parte del cuerpo durante el proceso de chorreado.
- Utilice sólo abrasivo del tipo óxido de aluminio.
- El óxido de aluminio utilizado en el Microarenador puede provocar irritación en la piel, en los ojos y en el sistema respiratorio. En ningún caso utilice el Microarenador sin los equipos de protección individual (EPI).
- Nunca utilice óxido de aluminio con restos de humedad o contaminados.
- Nunca utilice óxido de aluminio con granulaciones que no se encuentren dentro de lo especificado por el fabricante (hasta 100 Micrones).

11. Condiciones especiales de almacenamiento

El Microarenador Lab debe ser almacenado en las siguientes condiciones:

- Con la abrazadera instalada en el botón de accionamiento (04), manteniéndolo siempre presionado.
- Siempre desconectado de la red de aire comprimido y/o del equipo;
- En un lugar fresco, seco y libre de polvo;
- Lejos de productos químicos y de fuentes de calor y luz solar;
- Preferentemente, en su embalaje original.

12. Problemas y soluciones

Problema	Causa	Solución
Flujo de aire y/o abrasivo ausente, o insuficiente en la aguja eyectora (01) ***.	Conexión incorrecta del Microarenador a la red de aire comprimido.	Ver ítem 6 de este manual de instrucciones e instale correctamente el Microarenador.
	Presión de la red de aire comprimido deficiente o inestable.	Ver ítem 6 de este manual de instrucciones y monitoree la presión correcta, (60 a 80 lbf/pul ² (4~5,5 kgf/cm ²)).
	Estrangulamiento de la manguera de accionamiento por la palanca del botón.	Ver ítem 7, parte 3 de este manual de instrucciones.
	Cantidad de abrasivo (óxido de aluminio) insuficiente en el depósito (06).	Abastezca el depósito (06) como máximo con $\frac{3}{4}$ de su capacidad con óxido de aluminio.
Obstrucciones ***.	Presencia de humedad en el sistema de aire comprimido.	La red de aire comprimido debe ser seca. Verifique la eficiencia de los filtros coalescentes y la presencia de humedad.
	Presencia de humedad en el abrasivo.	El abrasivo debe estar libre de humedad, en días húmedo es necesario el secado previo en estufa u olla abierta a 250 °C por 30 minutos.
	Granulación incorrecta, fuera de lo especificado en el manual del usuario.	Utilizar sólo abrasivo del tipo óxido de aluminio de hasta 100 micrones, preferentemente suministrado por el fabricante.
	Reutilización de abrasivos con la presencia de residuos (intento de "reciclaje").	El excedente de óxido de aluminio utilizado en el chorreado debe ser eliminado.
Fuga de aire en el cuerpo del Microarenador.	Manguera de accionamiento interna dañificada.	Póngase en contacto con el Servicio de Servicio técnico autorizado.
Fuga de aire en la aguja del pico eyector.	Desplazamiento de la manguera interna de accionamiento de la palanca.	Póngase en contacto con el Servicio de Servicio técnico autorizado.

***Si hay obstrucción de la tubería interna del Microarenador, un procedimiento sencillo de "Retrochorro" puede resolver el problema. Para ello, consulte las informaciones descritas en el ítem 8. Mantenimiento y limpieza de este manual de instrucciones.

14. Términos de la garantía y Servicio técnico autorizado

El fabricante ofrece garantía de seis meses para este producto a partir de la fecha de su adquisición. Esta garantía cubre cualquier defecto de fabricación, que se presta a través de la reparación del equipo bajo las siguientes condiciones:

- Que el producto se haya utilizado correctamente, de acuerdo con las instrucciones descritas en el manual de instrucciones;
- La reclamación debe estar acompañada de la factura comercial y registrada dentro del período de garantía, además de un informe con la descripción del defecto y número de serie del producto;
- El producto sea utilizado, transportado y almacenado con cuidado;
- El costo de transporte (ida y vuelta) corra por cuenta del cliente;

Límites de la garantía:

- Desgaste natural de las piezas;
- Mal uso, caídas o siniestros;
- Transporte inapropiado;
- Reparación por personas no autorizadas;
- Uso en desacuerdo con las características y finalidades del producto;
- Desgastes por exposición a condiciones adversas (humedad, frío y calor intenso);
- Daños debido a la falta de limpieza o mantenimiento con productos inapropiados;

En caso de dudas, consulte el fabricante.

15. Servicio técnico autorizado

Para su seguridad, el servicio técnico de este producto debe ser realizado por personas/empresas autorizadas.